

# TUTORIEL C2CARE

## Guide d'installation des applications C2Care sur Oculus Quest

 N'exposez pas les lentilles du casque au soleil.

### Installation de l'application Meta Quest et du mode développeur

Si vous venez de recevoir votre Meta Quest 2 et que vous avez déjà :

- 1 Installé l'application Meta Quest sur votre téléphone
- 2 Créé un compte Meta et
- 3 Appairé votre Meta Quest 2 à votre application

Allez à l'étape 4. **Passage en mode développeur**, dans le cas contraire suivez les étapes 1 - 3 :

**1** Ouvrez l'application Meta Quest (Oculus)  sur votre smartphone. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger sur Google Play ou Apple Store.


**2** Après avoir téléchargé et ouvert l'application, créez un compte à l'aide des options suivantes.




**3** Appairer votre casque Meta Quest 2 à l'aide du code affiché dans votre casque.



**4** Passage en mode développeur : Aller dans **Menu** et appuyez sur **Appareils**.

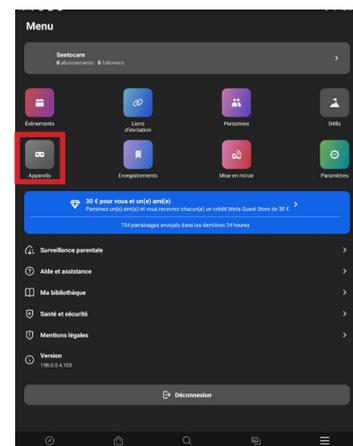


Appuyez sur le **Mode développeur**, puis **Démarrez**.

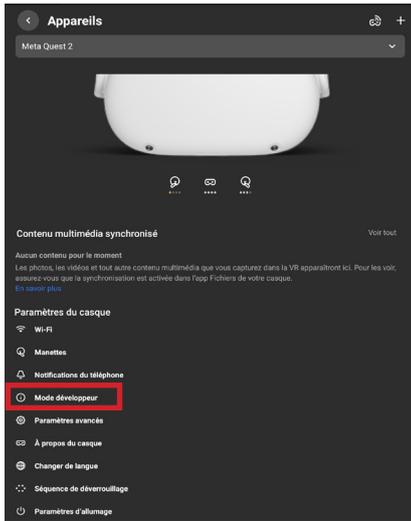


5

Une fois sur la page redirigée, suivez le lien comme indiqué ci-dessous.

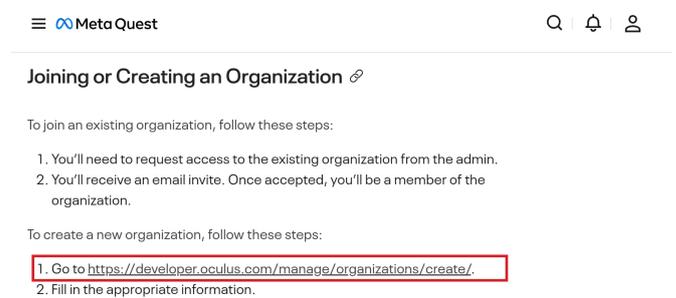

6

Vérifier votre compte développeur, en cliquant sur le bouton **Set Up**.

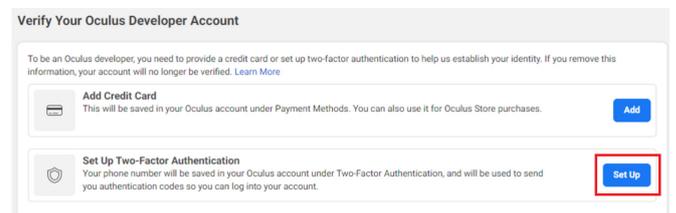

7

Vous allez être redirigé sur une page **Mot de passe et sécurité**, cliquez sur **Edit** au niveau d'authentification à deux facteurs.




8

Appuyez sur **Ajouter un numéro de téléphone** et entrez le code de vérification reçu sur votre téléphone.




9

Revenez sur l'onglet de l'étape 7 et cliquez sur **Retour au menu (Back to Home)**.

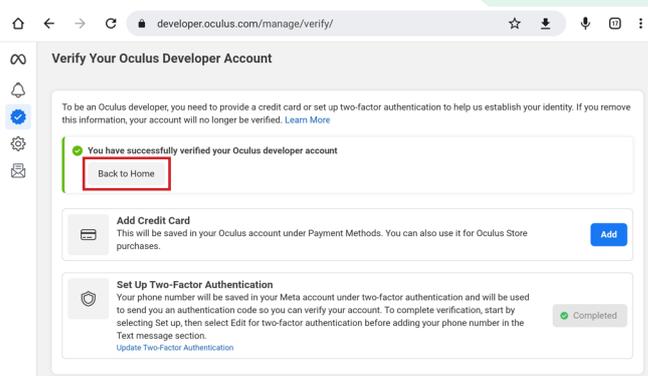


Créer votre organisation :

- 1 Entrez le nom de votre choix
- 2 Acceptez les conditions
- 3 Appuyez sur **Envoyer**

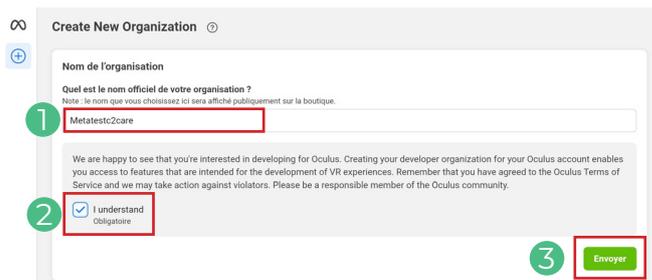

Revenez sur l'application **Meta Quest** et cocher le mode développeur qui apparaît ainsi.

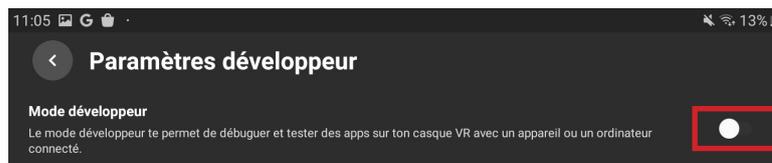

## Installation des drivers et de Sidequest sur votre ordinateur

À présent, vous allez devoir installer les drivers (cette manipulation n'est nécessaire que si vous êtes sur **Windows**, sinon allez à l'étape 5). Pour cela, rendez-vous à l'adresse suivante : <https://developer.oculus.com/downloads/package/oculus-go-adb-drivers/> et cliquez sur le bouton **Télécharger**.

Oculus Go ADB Drivers

Published: 9 mai 2018

VERSION


TÉLÉCHARGER

Sélectionnez le dossier de téléchargement sur votre ordinateur. Faites un clic droit sur le dossier et faites **Extraire ici**. Maintenant, vous pouvez ouvrir le fichier que vous venez de décompresser en double-cliquant dessus.



3


Une fois ouvert, faites un clic droit sur **Android-winsub.inf** et sélectionnez **Installer**.

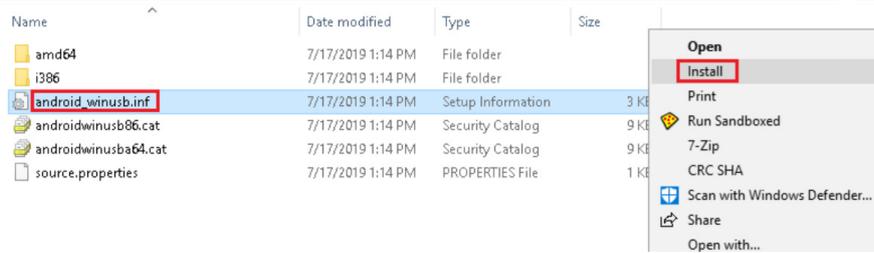

Si votre ordinateur est sous **Windows 11** vous aurez quelques étapes en plus pour trouver le bouton vous permettant d'installer android\_winsub.

- 1 Faites un clic droit sur **android\_winsub.inf**
- 2 Cliquez ensuite sur **Afficher plus d'options**
- 3 Cliquez sur **Installer**

4

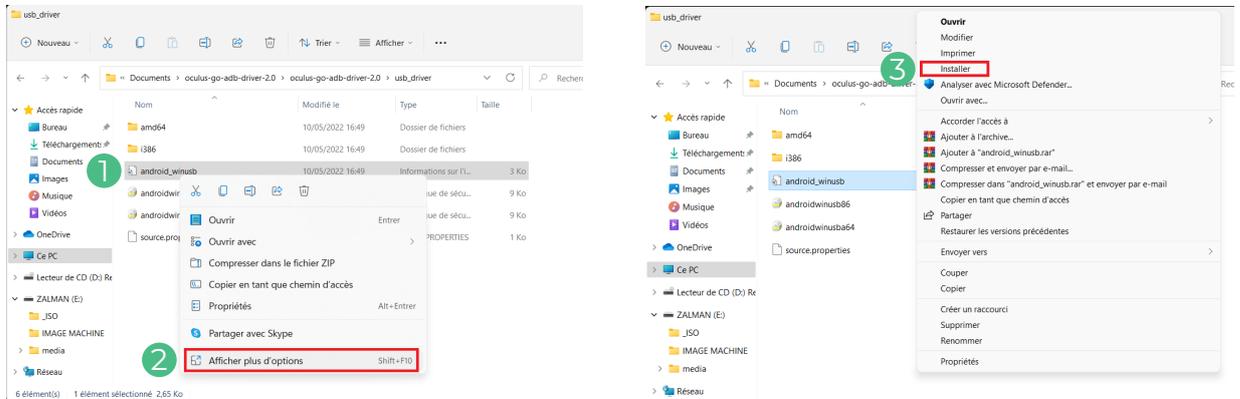

5

Se rendre sur le site <https://sidequestvr.com/setup-howto> pour télécharger et installer **SideQuest Advanced Installer**.

**Advanced Installer (LTS)**

**Step 1: Download SideQuest & Sign Up**  
Install SideQuest on windows, linux or mac and create an account [here](#).

**Desktop Download**

- DOWNLOAD FOR WINDOWS 10 X64 71.59MB  
v0.10.27 / 71.59MB / 680,090 downloads
- DOWNLOAD FOR OS X / MACOS 10.12+ 102.36MB  
v0.10.27 / 102.36MB / 113783 downloads
- DOWNLOAD FOR OS X / MACOS 10.12+ (M1/ARM) 104.22MB  
v0.10.27 / 104.22MB / 62373 downloads
- DOWNLOAD FOR LINUX 67.25MB  
v0.10.27 / 67.25MB / 82688 downloads



## Téléchargement et installation des applications C2Care

1 Les applications C2Care (sous forme .SDK) sont disponibles à travers les différents liens suivant :


C2Hypno : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2hypno.apk>

C2Custom : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2custom.apk>

C2Drive : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2drive.apk>

C2Phobia : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2phobia.apk>

2 Connectez à présent votre casque à votre ordinateur via votre câble USB et le port situé sur le côté gauche du casque. Une fois que votre casque est relié à votre ordinateur, enfiler votre casque. Vous verrez s'afficher le message suivant :

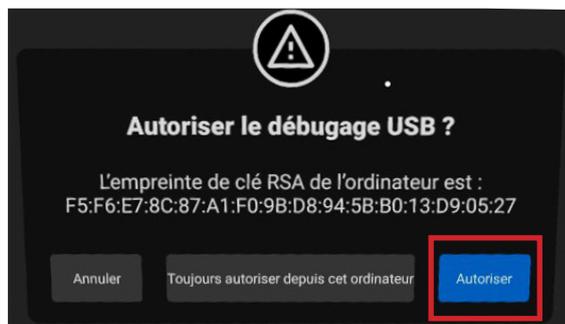

Cochez la case **Toujours autoriser pour cet ordinateur** afin de ne plus recevoir le message la prochaine fois que vous reconnecterez le casque puis cliquez sur **Ok**.

3 Retournez maintenant sur le logiciel **SideQuest** sur votre ordinateur, vous verrez une pastille verte en haut à gauche de la fenêtre du logiciel.




4 Vous pouvez maintenant cliquer sur l'icône  **Install APK file from folder on your computer**.



5

Sélectionnez dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir les fichiers des logiciels que vous avez précédemment téléchargés. Une fois tous les logiciels qui vous intéressent sélectionnés, appuyez sur le bouton **Ouvrir**.

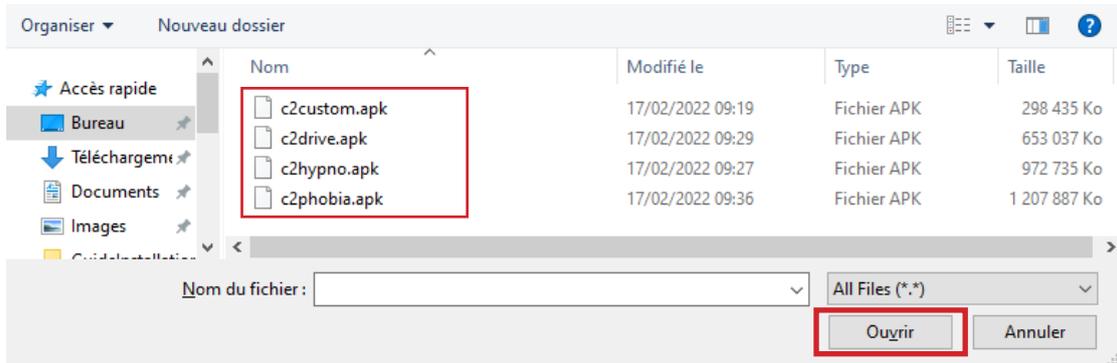

Une fois installé, vous pouvez débrancher votre casque de votre ordinateur.

## IV


### Lancer les logiciels depuis l'Oculus Quest

Vous trouverez dans votre bibliothèque les logiciels que vous venez d'installer.

1

1 Rendez-vous dans la rubrique **Applications** dans la barre de menu.

2 Dans le menu en haut à droite de l'interface applications, sélectionnez **Sources inconnues**.

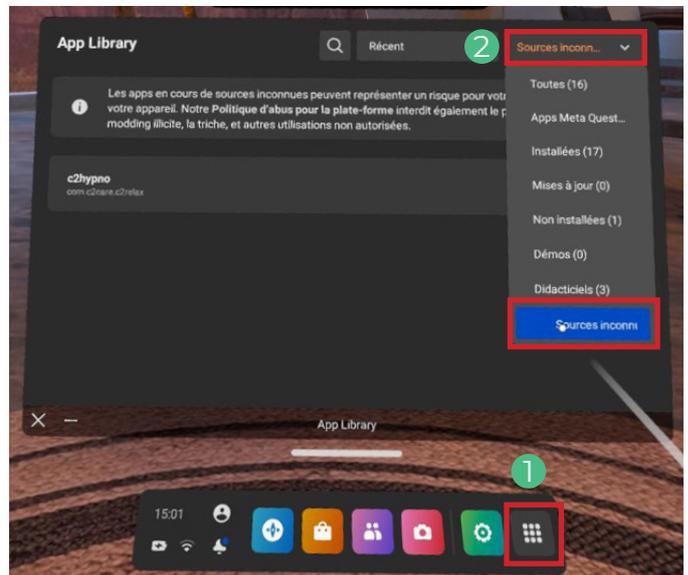

2

Vous trouverez toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. Vous pouvez ouvrir vos applications depuis ce menu. Quand une application est lancée, vous allez voir un code d'identification à 5 chiffres et/ou lettres que vous devez envoyer au [secretariat@c2.care](mailto:secretariat@c2.care). Le code est identique pour toutes les applications, merci de l'envoyer qu'une seule fois.