

TUTORIEL C2CARE

Casque sans fil Pico Neo 4



 N'exposez pas les lentilles du casque au soleil.


1

Allumez votre casque en appuyant 3 secondes sur le bouton «power»  avec une pastille rouge . Allumez les manettes avec . Si le casque ou les manettes ne s'allument pas, veuillez le charger ou changer les piles des manettes.

2

Si vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi sur votre casque :


- 1 Cliquez avec la gâchette sur le logo du réseau .
- 2 Cliquez sur le menu du réseau WLAN.
- 3 Cliquez sur le slider pour l'allumer .
- 4 Cliquez sur le réseau choisi et saisissez le mot de passe.

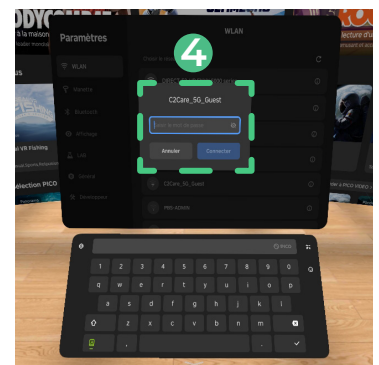

3


Ajustez votre casque sur la tête. Définissez une zone de jeu personnalisée (première utilisation) :

- 1 Cliquez avec la gâchette sur le **Mode personnalisé**.
- 2 Avancez en suivant les étapes et en validant avec la gâchette.
- 3 Regardez vers le sol et touchez le sol avec la gâchette, puis appuyez.
- 4 Tracer avec la gâchette un espace de jeu dégagé.

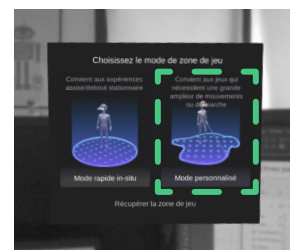


4

Cliquez sur : **Application ou Bibliothèque** et ensuite sur une application C2Care.

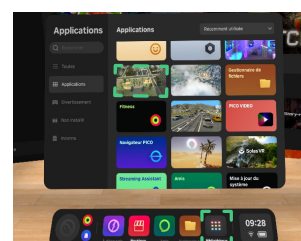

5

Lancez le navigateur Google Chrome sur votre PC ou tablette. Rendez-vous sur le site web my.c2.care et connectez-vous avec vos identifiants.

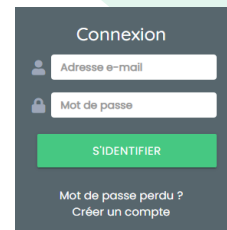


6

Assurez-vous que votre casque est ajouté sur le site web. Il doit apparaître en haut d'écran d'accueil.



7

Cliquez sur une icône d'application pour la choisir.

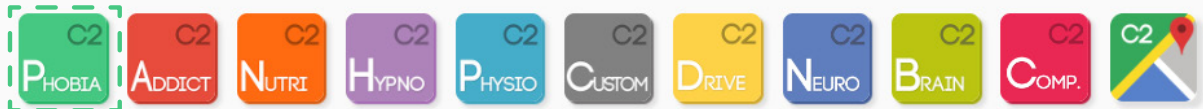


8

Cliquez sur un dossier pour accéder aux activités.




9

Cliquez sur une activité pour la sélectionner.

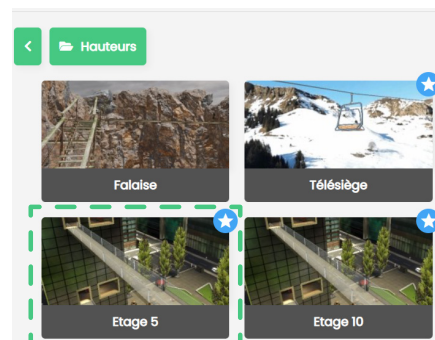

10

Modifiez les paramètres de l'activité si vous le souhaitez.

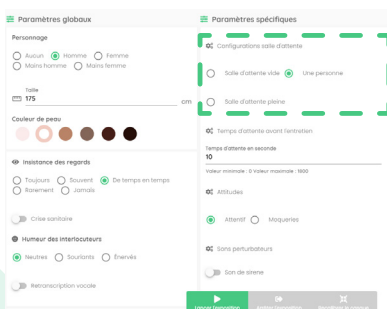

11

Lancez l'activité en appuyant sur le bouton vert. Vous pouvez également arrêter l'activité ou recalibrer le casque.

