

TUTORIEL C2CARE

Casque distant : contrôle du casque de patient à distance


⚠ N'exposez pas les lentilles du casque au soleil.

1 Vérifiez que votre patient est inscrit sur le site web my.c2.care et a souscrit à un abonnement de C2Care sur www.c2.care/fr/souscription-particulier/.

2 Votre patient peut utiliser son casque de réalité virtuelle s'il est compatible avec C2Care ou choisir un abonnement avec la location d'un casque.

3 Demandez à votre patient de :

- 1 Ouvrir une application de C2Care dans le casque.
- 2 Cliquer sur **Exposition avec mon thérapeute**.
- 3 Vous communiquer son code d'association.

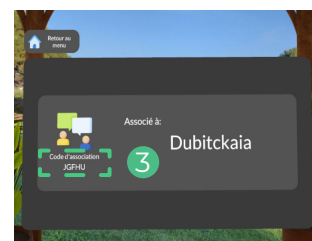

4 Dans votre compte my.c2.care, appuyez sur **Connecter un casque distant**.

CONNECTER UN CASQUE DISTANT

5 Entrez le code d'association dans le champ qui apparaît.

A screenshot of the C2Care application interface showing a form with a text input field labeled 'Entrez le code d'association'. A green checkmark icon is visible in the top right corner of the form, and a green checkmark button is located below the input field.

6 Lancez une application C2Care. Vous pouvez contrôler et voir l'exposition de votre patient en temps réel.

