




TUTORIEL C2CARE

Mettre à jour les applications

1 Allumez votre casque en appuyant longtemps sur le bouton «power»  avec une pastille rouge . Allumez les manettes avec .

Si vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi sur votre casque :

- 1 Cliquez avec la gâchette sur le logo du réseau .
- 2 Cliquez sur le slider pour l'allumer .
- 3 Cliquez sur le réseau choisi et saisissez le mot de passe.


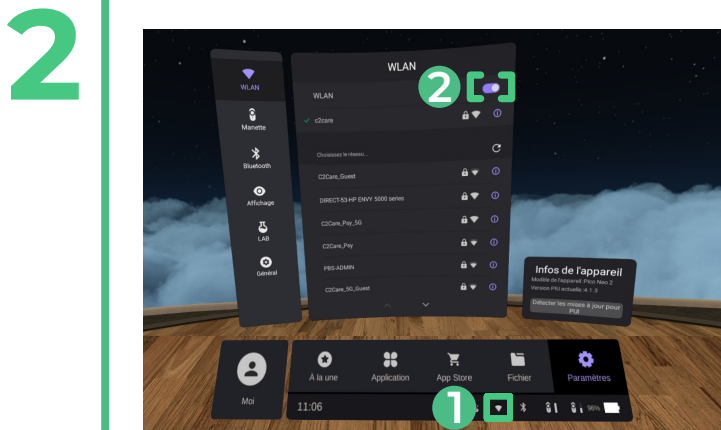


Dans le casque, cliquez avec la gâchette sur **App Store** ou **Boutique**, puis sur **Se connecter**.



Si vous avez déjà un compte Pico, passez à l'étape 6. Si vous n'avez pas de compte Pico, cliquez sur **S'inscrire** et remplissez les champs d'inscription avec l'email et le mot de passe de votre choix.

4

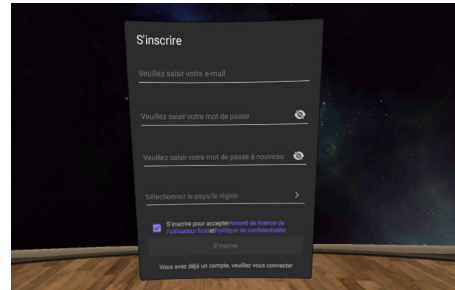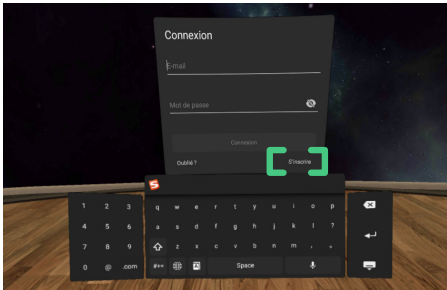


5

Vérifiez vos emails pour valider votre adresse.

Connectez-vous à votre compte dans le casque.

Dans **App Store** ou **Boutique**, cliquez sur **Recherche Q**, tapez **C2** et cliquez sur ↶.

6

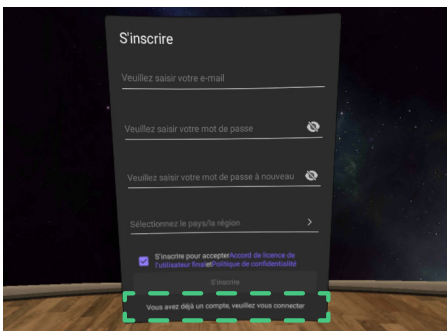

7



8

Cliquez sur chaque application de C2Care et vérifiez s'il y a des mises à jours disponibles. Cliquez sur **Mettre à jour** si possible :

