

TUTORIEL C2CARE

Guide d'installation des applications C2Care sur Oculus Quest

 N'exposez pas les lentilles du casque au soleil.

Installation de l'application Meta Quest et du mode développeur

Si vous venez de recevoir votre Meta Quest 2 et que vous avez déjà :

- 1 Installé l'application Meta Quest sur votre téléphone
- 2 Créé un compte Meta et
- 3 Appairé votre Meta Quest 2 à votre application

Allez à l'étape 4. **Passage en mode développeur**, dans le cas contraire suivez les étapes 1 - 3 :

1 Ouvrez l'application Meta Quest (Oculus)  sur votre smartphone. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger sur Google Play ou Apple Store.


2 Après avoir téléchargé et ouvert l'application, créez un compte à l'aide des options suivantes.



3 Appairer votre casque Meta Quest 2 à l'aide du code affiché dans votre casque.




4 Passage en mode développeur : Aller dans **Menu** et appuyez sur **Appareils**.

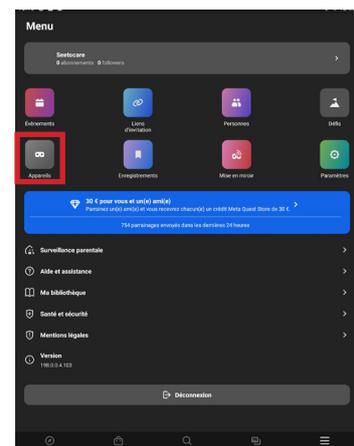

Appuyez sur le **Mode développeur**, puis **Démarrez**.

5

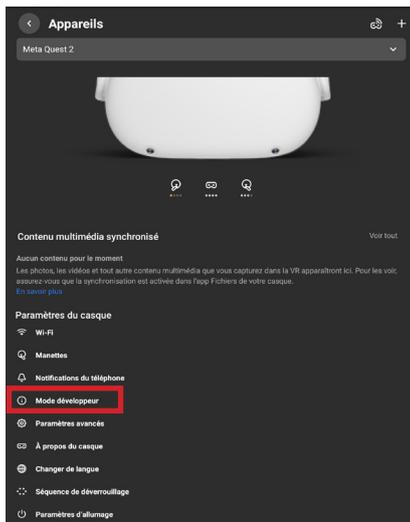

Une fois sur la page redirigée, suivez le lien comme indiqué ci-dessous.

6

Vérifier votre compte développeur, en cliquant sur le bouton **Set Up**.

7

Vous allez être redirigé sur une page **Mot de passe et sécurité**, cliquez sur **Edit** au niveau d'authentification à deux facteurs.

8

Appuyez sur **Ajouter un numéro de téléphone** et entrez le code de vérification reçu sur votre téléphone.

9




Joining or Creating an Organization

To join an existing organization, follow these steps:

1. You'll need to request access to the existing organization from the admin.
2. You'll receive an email invite. Once accepted, you'll be a member of the organization.

To create a new organization, follow these steps:


1. Go to <https://developer.oculus.com/manage/organizations/create/>.
2. Fill in the appropriate information.

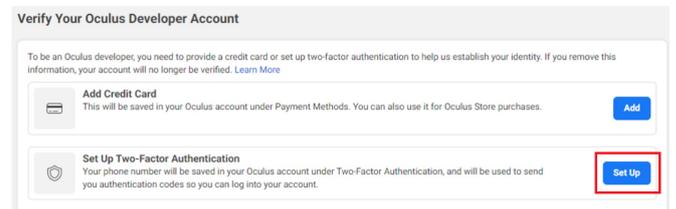

Mot de passe et sécurité




Revenez sur l'onglet de l'étape 7 et cliquez sur **Retour au menu (Back to Home)**.

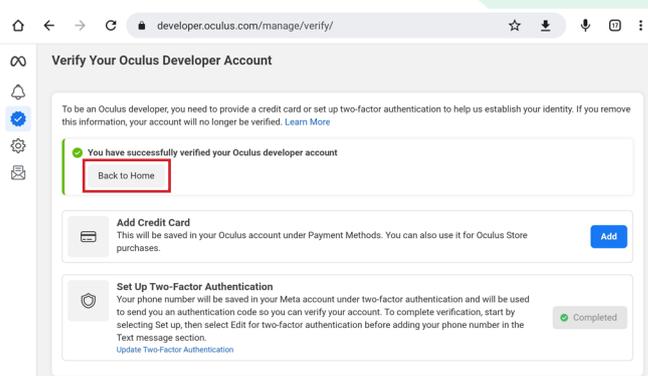


Créer votre organisation :

- 1 Entrez le nom de votre choix
- 2 Acceptez les conditions
- 3 Appuyez sur **Envoyer**

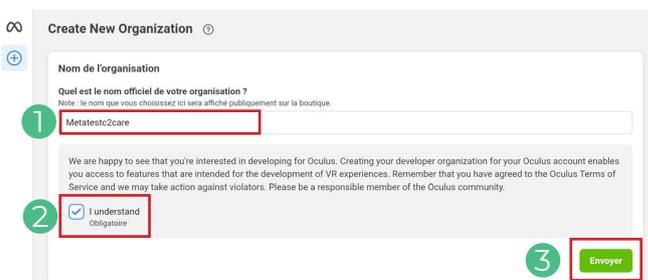

Revenez sur l'application **Meta Quest** et cocher le mode développeur qui apparaît ainsi.

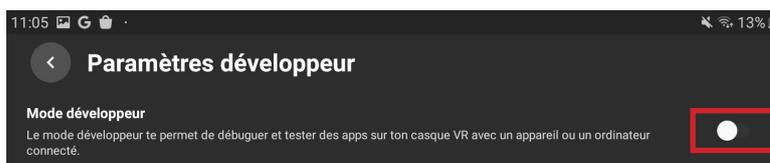

Installation des drivers et de Sidequest sur votre ordinateur

À présent, vous allez devoir installer les drivers (cette manipulation n'est nécessaire que si vous êtes sur **Windows**, sinon allez à l'étape 5). Pour cela, rendez-vous à l'adresse suivante : <https://developer.oculus.com/downloads/package/oculus-go-adb-drivers/> et cliquez sur le bouton **Télécharger**.

Oculus Go ADB Drivers

Published: 9 mai 2018

VERSION


TÉLÉCHARGER

Sélectionnez le dossier de téléchargement sur votre ordinateur. Faites un clic droit sur le dossier et faites **Extraire ici**. Maintenant, vous pouvez ouvrir le fichier que vous venez de décompresser en double-cliquant dessus.



3


Une fois ouvert, faites un clic droit sur **Android-winsub.inf** et sélectionnez **Installer**.

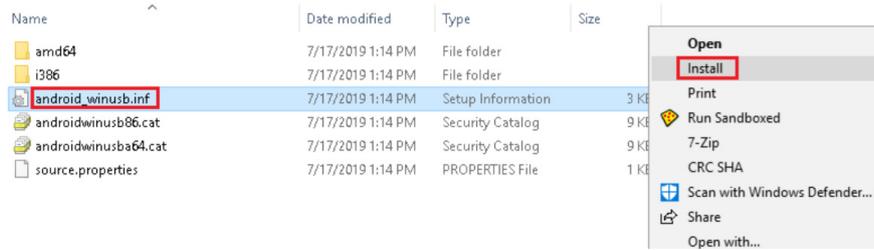

Si votre ordinateur est sous **Windows 11** vous aurez quelques étapes en plus pour trouver le bouton vous permettant d'installer android_winsub.

- 1 Faites un clic droit sur **android_winsub.inf**
- 2 Cliquez ensuite sur **Afficher plus d'options**
- 3 Cliquez sur **Installer**

4

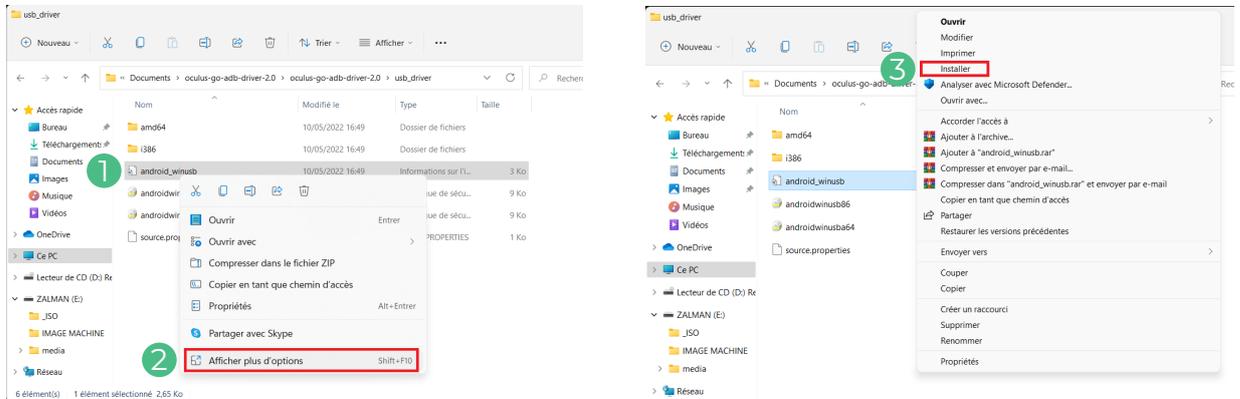

5

Se rendre sur le site <https://sidequestvr.com/setup-howto> pour télécharger et installer **SideQuest Advanced Installer**.

Advanced Installer (LTS)

Step 1: Download SideQuest & Sign Up
Install SideQuest on windows, linux or mac and create an account [here](#).

Desktop Download

- DOWNLOAD FOR WINDOWS 10 X64 71.59MB
v0.10.27 / 71.59MB / 680,090 downloads
- DOWNLOAD FOR OS X / MACOS 10.12+ 102.36MB
v0.10.27 / 102.36MB / 113783 downloads
- DOWNLOAD FOR OS X / MACOS 10.12+ (M1/ARM) 104.22MB
v0.10.27 / 104.22MB / 62373 downloads
- DOWNLOAD FOR LINUX 67.25MB
v0.10.27 / 67.25MB / 82688 downloads



Téléchargement et installation des applications C2Care

1 Les applications C2Care (sous forme .SDK) sont disponibles à travers les différents liens suivant :

C2Hypno : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2hypno.apk>

C2Custom : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2custom.apk>

C2Drive : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2drive.apk>

C2Phobia : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2phobia.apk>

C2Addict : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2addict.apk>

C2Nutri : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2nutri.apk>


C2Physio : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2physio.apk>

C2Companion : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2companion.apk>

C2Brain : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2brain.apk>

C2Neuro : <https://media.c2.care/app/last/quest/c2neuro.apk>

2 Connectez à présent votre casque à votre ordinateur via votre câble USB et le port situé sur le côté gauche du casque. Une fois que votre casque est relié à votre ordinateur, enfitez votre casque. Vous verrez s'afficher le message suivant :

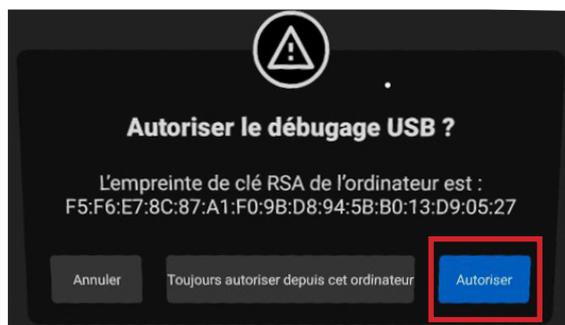


Cochez la case **Toujours autoriser pour cet ordinateur** afin de ne plus recevoir le message la prochaine fois que vous reconnecterez le casque puis cliquez sur **Ok**.

3 Retournez maintenant sur le logiciel **SideQuest** sur votre ordinateur, vous verrez une pastille verte en haut à gauche de la fenêtre du logiciel.




4 Vous pouvez maintenant cliquer sur l'icône  **Install APK file from folder on your computer**.

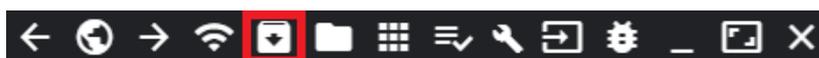

5

Sélectionnez dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir les fichiers des logiciels que vous avez précédemment téléchargés. Une fois tous les logiciels qui vous intéressent sélectionnés, appuyez sur le bouton **Ouvrir**.

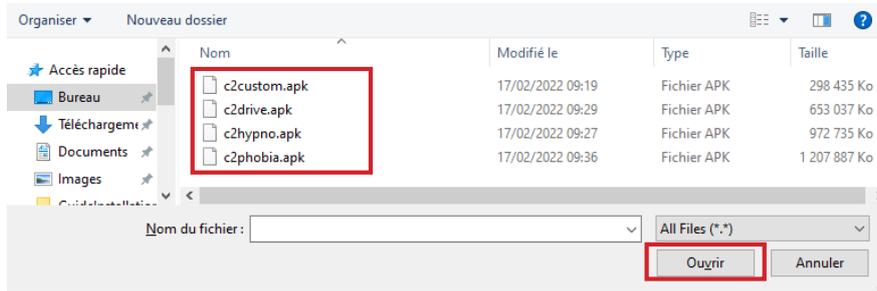

Une fois installé, vous pouvez débrancher votre casque de votre ordinateur.

IV

Lancer les logiciels depuis l'Oculus Quest


1

Vous trouverez dans votre bibliothèque les logiciels que vous venez d'installer.

1 Rendez-vous dans la rubrique **Applications** dans la barre de menu.

2 Dans le menu en haut à droite de l'interface applications, sélectionnez **Sources inconnues**.

3 Ici vous pouvez trouver et ouvrir toutes les applications que vous avez téléchargées et installées.

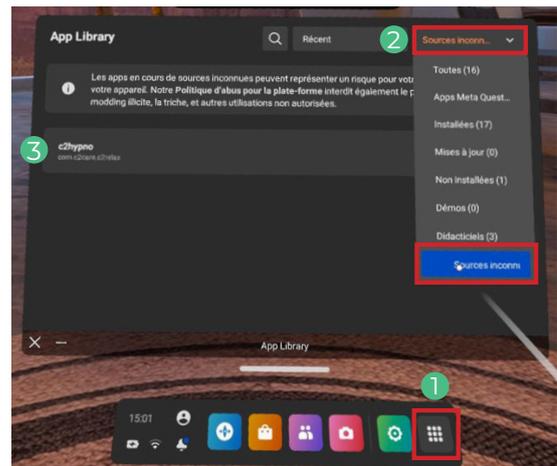


2

Quand vous lancez une application pour la première fois, vous devez noter le code d'identification à 5 caractères qui apparaît dans le casque.

1 Dans votre compte sur le site web my.c2.care, appuyez sur **Ajouter un casque sans fil**.

2 Rentez le code dans le champ proposé.

3 Cliquez sur **Connectez**.

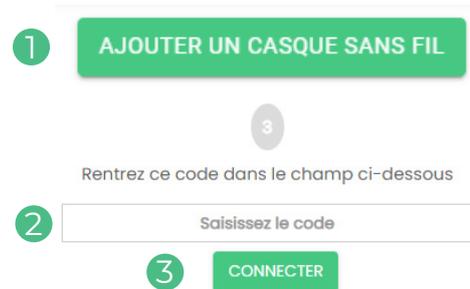

Dès maintenant vous pouvez utiliser les applicatons de C2Care.