



Installation de l'application C2Care dans un casque Pico 4

1. Veuillez nous transmettre par mail, à l'adresse support@c2.care, l'adresse e-mail reliée au compte Pico de votre casque.
2. Nous vous enverrons dans les 24 à 72h sur cette adresse une invitation pour être autorisé à télécharger l'application C2Care.
3. Acceptez la en cliquant sur **"this link"**.
4. Une nouvelle page s'ouvrira sur votre navigateur, cliquez sur **"Subscribe now"**
5. Une fois que le message **"Subscribed. You have subscribed to Release Candidate of C2Care B2C..."** s'affiche, retournez dans votre casque.
6. Vous trouverez l'application dans le répertoire **"Pas installé"**. Si vous ne la trouvez pas, redémarrez votre casque et retournez dans le répertoire.
7. Cliquez sur l'application pour l'installer.
8. Une fois installée, elle apparaîtra dans le répertoire **"Applications"**
9. Ouvrez l'application. Un code sera affiché, envoyez le à l'adresse support@c2.care et nous activerons votre accès à l'application dans les 24 à 72h.
10. Vous êtes prêt !