


TUTORIEL C2CARE

Casque filaire avec application PC

1

Connectez votre casque filaire avec l'ordinateur comme indiqué sur la notice. Si le casque est branché, le *Portail de réalité mixte* se lance. Allumez les manettes en appuyant longtemps sur le bouton «power» .



Portail de réalité mixte
Application

2

Lancez l'application **MyC2Care** sur votre PC et connectez-vous avec vos identifiants.



Authentification

Identifiant _____

Mot de passe _____

Connexion automatique

Connexion

Mot de passe oublié ?

3

Cliquez sur une icône d'application pour la choisir.

Les applications

Mes appareils

| Appareil | Modèle | Date d'association | Actions |
|----------|-----------------|--------------------|------------------|
| | LAPTOP-DB9JNQ2B | 24/10/2022 | Éditer Dissocier |
| | GASSIN | 24/10/2022 | Éditer Dissocier |

AJOUTER UN CASQUE SANS FIL

PREMIÈRE UTILISATION **TUTORIELS**





N'exposez pas les lentilles du casque au soleil.

4

Cliquez sur le bouton **Lancez l'application**. Une nouvelle fenêtre de visualisation va s'ouvrir.




5

Cliquez sur un dossier pour accéder aux activités.




6

Cliquez sur une activité pour la sélectionner.

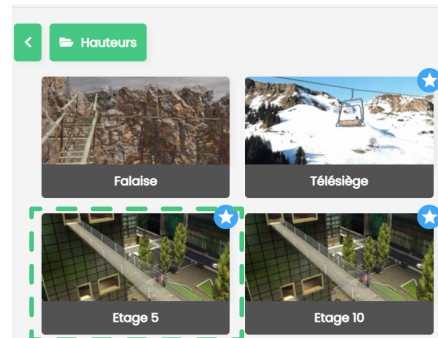

7

Modifiez les paramètres de l'activité si vous le souhaitez.

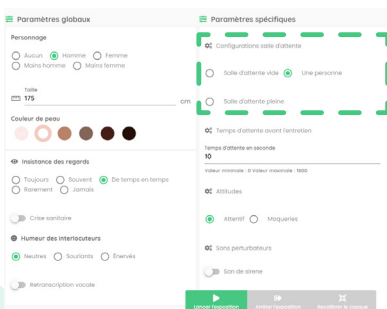

8

Lancez l'activité en appuyant sur le bouton vert. Vous pouvez également arrêter l'activité ou recalibrer le casque.

