




# TUTORIEL C2CARE

Casque sans fil hors ligne avec tablette



N'exposez pas les lentilles du casque au soleil.



1

Allumez votre casque en appuyant 3 secondes sur le bouton «power»  avec une pastille rouge . Allumez les manettes avec . Si le casque ou les manettes ne s'allument pas, veuillez les charger ou changer les piles des manettes.

2

Ajustez votre casque sur la tête. Définissez une zone de jeu personnalisée (première utilisation) :

- 1 Cliquez avec la gâchette sur le Mode personnalisé.
- 2 Avancez en suivant les étapes et en validant avec la gâchette.
- 3 Regardez vers le sol et touchez le sol avec la gâchette, puis appuyez.
- 4 Tracer avec la gâchette un espace de jeu dégagé.

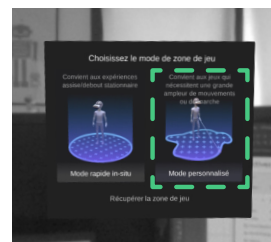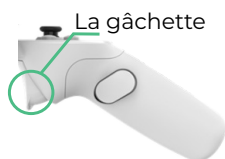

3

Dans le casque, cliquez sur *Application* ou *Bibliothèque*, puis sur une application de C2Care.




4  N'activez pas le Wi-Fi sur votre tablette !

5 Assurez-vous que votre casque est ajouté dans MyC2Care. Il doit apparaître en haut de l'écran d'accueil.




6 Dans MyC2Care, cliquez sur une icône d'application pour la choisir.

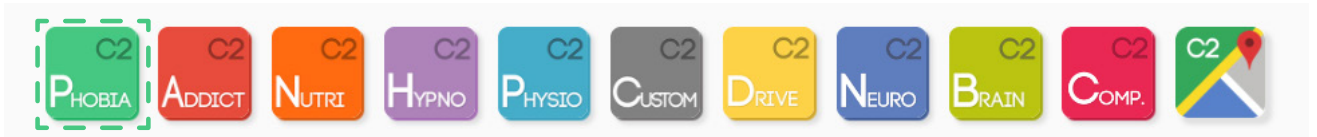


7 Cliquez sur un dossier pour accéder aux activités.



8 Cliquez sur une activité pour la sélectionner.

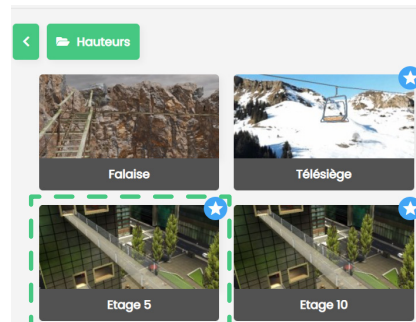

9 Modifiez les paramètres de l'activité si vous le souhaitez.

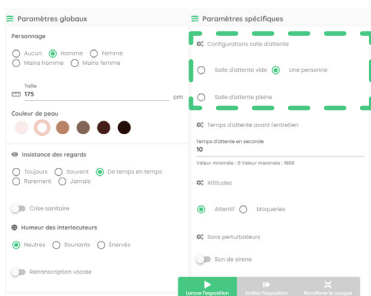

10 Lancez l'activité en appuyant sur le bouton vert. Vous pouvez arrêter l'activité ou recalibrer le casque.

