



## Instalar la aplicación C2Motion

*Esta configuración es compatible con: Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3 y Meta Quest 3S.  
Si su casco es nuevo, realice la configuración inicial de Meta.*

1. Verifique que la versión del casco esté actualizada (Configuración > General > Actualización de software).
2. Abra el **menú META** y el **navegador de internet** desde la barra de tareas.
3. Introduzca manualmente la siguiente URL: <https://c2.care/motion> : la descarga comenzará automáticamente.
4. Abra la **biblioteca**, luego **Archivos** y después **Recientes** para ver el archivo descargado.
5. Seleccione los tres puntos del archivo y elija **“Abrir con”** y luego **“Instalador de paquetes”**.
6. Acepte la alerta de seguridad y autorice la instalación desde fuentes desconocidas. Confirme la instalación.
7. La aplicación C2Motion ya está instalada. Puede encontrarla en la **biblioteca**, en **“Fuentes desconocidas”**.
8. Abra la aplicación C2Motion, anote el código de emparejamiento que aparece y luego vaya a <https://app.c2.care>, inicie sesión en su cuenta en **“Perfil”** y haga clic en **“Emparejar un casco”** para introducir el código y completar la vinculación.

**¡Enhorabuena, la instalación ha finalizado!**

**Ahora puede disfrutar plenamente de los servicios de C2Motion.**

(Si encuentra algún problema técnico, puede contactarnos en [support@c2.care](mailto:support@c2.care) )