



Configuración de un visor Meta Quest VR

Esta configuración es compatible con:

- Meta Quest 2
 - Meta Quest 3
 - Meta Quest 3S
 - Meta Quest Pro
1. Recibirá un correo electrónico de Meta entre **24 y 72 horas después de su registro**. Le recomendamos revisar su bandeja de entrada para localizar dicho mensaje.
 2. En el correo, haga clic en el enlace **“Setup your account”** (Configurar su cuenta).
 3. Ingrese su dirección de correo electrónico.
 4. Recibirá un código por correo para completar el registro en el sitio web de Meta.
 5. El sitio web solicitará varios datos: contraseña, nombre y fecha de nacimiento. Por favor, complete estos campos para finalizar la configuración de su cuenta de Meta.
 6. **Si su visor Meta VR no es nuevo** (es decir, si ya ha sido utilizado anteriormente), deberá restablecerlo:
 - Apague su visor.
 - Mantenga presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón de volumen “-” hasta que aparezca la pantalla de inicio.
 - Utilice los botones de volumen para seleccionar la opción “Restablecer”, y luego presione el botón de encendido para confirmar.
 7. Después de la inicialización, **NO seleccione** la opción “Emparejar su visor con la aplicación Meta Horizon para continuar”. En su lugar, elija la opción que aparece justo debajo: **“Conectarse a su organización”**.

8. Continúe con la configuración inicial. La aplicación C2Care se descargará e instalará automáticamente. Iníciela desde el directorio “Para el trabajo” o “Aplicaciones”.
9. Se mostrará un código en la aplicación C2Care. Deberá ingresar este código en su cuenta en app.c2.care.
10. ¡Ya está todo listo!