



## Configura un Meta Quest VR Headset

*Esta configuración es compatible con:*

- *Meta Quest 2*
  - *Meta Quest 3*
  - *Meta Quest 3S*
  - *Meta Quest Pro*
1. Recibirás un correo electrónico de Meta entre 1 y 48 horas después de tu suscripción. Revisa tu correo para encontrar este mensaje
  2. En el correo de Meta, haz clic en el enlace "**Setup your account**".
  3. Ingresa tu dirección de correo electrónico.
  4. Recibirás un código por correo electrónico para registrarte en el sitio web de Meta.
  5. El sitio web requerirá varios datos: contraseña, nombre, fecha de nacimiento. Completa estos campos para terminar de configurar tu cuenta de Meta.
  6. **Si tu visor Meta VR no es nuevo** (ha sido usado anteriormente) necesitarás restablecerlo:
    - Apaga el Meta VR
    - Presiona el botón de encendido y el botón de volumen "-" en el visor al mismo tiempo hasta que la pantalla de inicio se cargue
    - Use the volume buttons on your headset to select the Reset option, then press the power button
  7. Después de la primera inicialización NO ELIJAS "**Pair your headset with the Meta Horizon App to continue**", en lugar de eso elige la opción de abajo "**Connect to your organisation**"
  8. Continúa con la configuración inicial. La aplicación C2Care se descargará e instalará automáticamente. Lánzala a través del directorio "**For Work**" o "**Applications**"
  9. Se mostrará un código en la aplicación C2Care. Envía este código a [sales@c2.care](mailto:sales@c2.care) y activaremos tu visor en 24 a 72 horas.
  10. ¡Estás listo!