



Installer l'Application C2Motion

*Cette configuration est compatible avec : Meta Quest 2 - Meta Quest Pro - Meta Quest 3 - Meta Quest 3S
Si votre casque est neuf, effectuez la configuration initiale de Meta*

1. Vérifiez que la version du casque est à jour (paramètres / général / mise à jour logicielle).
2. Ouvrez le **menu META** et le **navigateur internet** dans la barre des tâches.
3. Entrez manuellement l'URL suivante : <https://c2.care/motion> : le téléchargement commence.
4. Ouvrez la **bibliothèque, Fichiers, Récents** pour voir le fichier téléchargé.
5. Sélectionnez les 3 petits points du fichier et choisissez "**Ouvrir avec**" et "**Programme installation kit**".
6. Acceptez l'alerte de sécurité et autorisez l'installation depuis la source inconnue. Validez l'installation.
7. L'application C2Motion est désormais installée. Vous pouvez la retrouver dans la **bibliothèque** et dans "**Sources Inconnues**".
8. Ouvrez l'application C2Motion, notez le code d'appairage affiché, puis rendez-vous sur <https://app.c2.care>, connectez-vous à votre compte dans « **Profil** » et cliquez sur « **Appairer un casque** » pour entrer le code et finaliser l'association.

Félicitations, votre installation est terminée !

Vous pouvez maintenant profiter pleinement de nos services C2Motion.

(en cas de problème technique rencontré, vous pouvez nous joindre sur support-fr@c2.care)