

# TUTORIEL C2CARE

## Casque filaire avec application PC

 N'exposez pas les lentilles du casque au soleil.

**1** Connectez votre casque filaire avec l'ordinateur par le biais de 2 câbles : celui avec une pastille rouge au port avec une pastille rouge, répétez pour le bleu. Veillez à bien connecter le câble au casque. Branchez l'ordinateur et le casque à l'alimentation.



**2** Une fois le casque branché, le *Portail de réalité mixte* se lance.

Allumez les manettes en appuyant longtemps sur le bouton «power» .



Portail de réalité mixte  
Application



**3** Ajustez votre casque sur la tête. Suivez les instructions dans le casque pour définir une zone de jeu.

**4** Lancez l'application **MyC2Care** sur votre PC et connectez-vous avec vos identifiants.



Authentification

Identifiant

Mot de passe

Connexion automatique

Connexion

[Mot de passe oublié ?](#)