


TUTORIEL C2CARE

Casque sans fil Pico Neo 2 & 3



⚠ N'exposez pas les lentilles du casque au soleil.


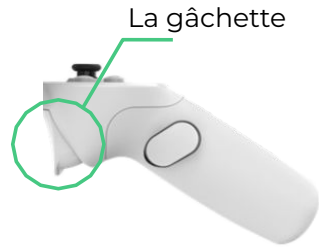


1 Allumez votre casque en appuyant sur le bouton «power»  avec une pastille rouge  jusqu'à l'apparition du logo. Allumez les manettes avec .

Si le casque ou les manettes ne s'allument pas, veuillez les charger ou changer les piles des manettes.


2 Si vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi sur votre casque :

- 1** Cliquez avec la gâchette sur le logo du réseau .
- 2** Cliquez sur le slider pour l'allumer .
- 3** Cliquez sur le réseau choisi et saisissez le mot de passe.

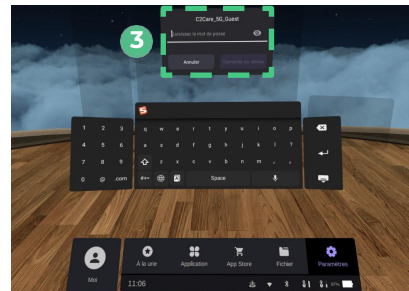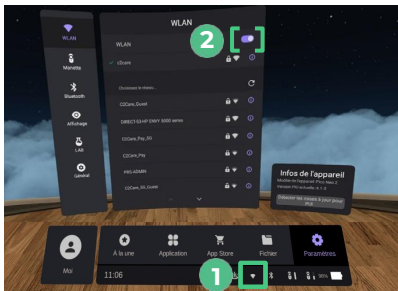

3 Ajustez votre casque sur la tête. Définissez une zone de jeu personnalisée (première utilisation) :

- 1 Cliquez avec la gâchette sur le **Mode personnalisé**.
- 2 Avancez en suivant les étapes et en validant avec la gâchette.

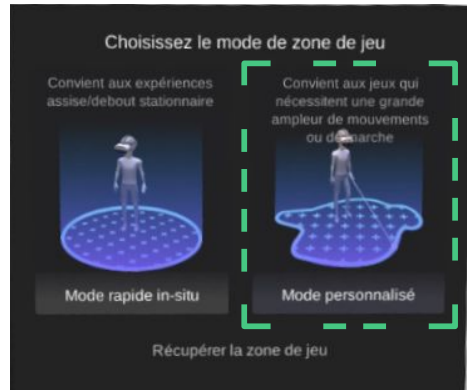

4 Cliquez sur : **Application** ou **Bibliothèque** et ensuite sur une application C2Care.



5 Lancez le navigateur Google Chrome sur votre **PC** ou **tablette**. Rendez-vous sur le site web **my.c2.care** et connectez-vous avec vos identifiants pour contrôler les expositions lancées dans le casque.

